

Klebeanleitung

So kleben Sie das Augenpflaster richtig auf:

Die Haut um das Auge Ihres Kindes sollte trocken, sauber und nicht frisch eingecremt sein.

1. Entfernen Sie das Schutzpapier vom Pflaster.
2. Kleben Sie das Pflaster von der Nase aus über das Auge. Achten Sie darauf, dass das Pflaster nicht auf der Augenbraue klebt. Die weiße Innenaufgabe liegt nun auf der Augenhöhle.
3. Drücken Sie das Pflaster an den Rändern sorgfältig und behutsam an.
4. Wenn Ihr Kind eine Brille trägt, setzt es die Brille über dem Pflaster wieder auf.



Wenn Sie das Pflaster nach der Tragezeit entfernen, ziehen Sie es sanft von der Nase aus zur Seite des Gesichts ab.



Nachhaltig



Aus Bambusvlies




Sanft zur Haut

Tipps, Infos & Motivationsartikel:

augenpflaster.com

f @ ORTOPAD.Augenpflaster

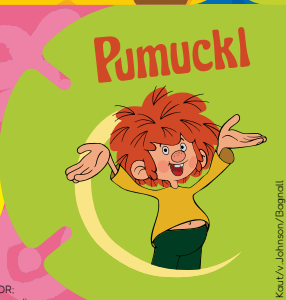

TRUSETAL
medical
Trusetal Verbandstoffwerk GmbH
Konrad-Zuse-Straße 15
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Tel.: 05207 991688-0
Fax: 05207 991688-28
info@tshts.eu
www.augenpflaster.com
f @ ORTOPAD.Augenpflaster

NEU
ORTOPAD mix

ORTOPAD®
mix